



Produktnummer: 01006

Gebrauchshinweise zum Kollagenosenkollektiv

Anwendung

Die Serumsammlung eignet sich zur Validierung von Testsystemen für Kollagenosenparameter oder zu deren klinischer Bewertung oder zum Vergleich von Testsystemen untereinander.

Packungsgröße

Jedes Kollagenosenkollektiv enthält 500 verschiedene Patientenproben mit je 0,5 ml gefrorenem Humanserum.

Der Bezug von identischen Kollagenosenkollektiven ist mehrfach möglich.

Spezifikationen

Die Serumsammlung enthält einen repräsentativen Querschnitt von differenzierten Kollagenosenserum mit tiefgehender klinischer Dokumentation.

Im folgenden sind die im Kollektiv enthaltenen Erkrankungen aufgeführt:

• Indikationen:

Rheumatoide Arthritis, SLE, PSS, Sjögren-Syndrom, MCTD, Vaskulitis, Autoimmune Lebererkrankungen, p-ANCA positive Kollagenosen und sonstige Kollagenosen.

Die Einzeleren enthalten keine Zusätze oder Stabilisatoren, die die Messungen beeinflussen könnten.

Dokumentation

Zur Serumsammlung wird eine umfangreiche Dokumentation in digitaler Form mitgeliefert. Diese enthält Informationen zu Indikation Alter und Geschlecht der Patienten sowie Messdaten der Untersuchungsparameter.

• Parameter:

ACA; AMA; ANA; c-ANCA, p-ANCA, anti-Cardiolipin, anti-CCP, anti-dsDNA, anti-ssDNA, anti-MPO, anti-Pm-Scl-100, anti-PR3, RF, anti-Sm, anti-SS-A, anti-SS-B u.a.

Angaben zu Testsystem und Referenzbereichen sind in der Datei zu finden. Auf Anfrage sind Informationen zu Begleiterkrankungen und Therapie erhältlich.

Lagerung und Haltbarkeit

Originalverschlossen und bei -18°C gelagert ist das Kollagenosenkollektiv bis zu 48 Monaten, maximal jedoch bis zum angegebenen Verfallsdatum, haltbar.

Gebrauchshinweise

Nach dem Auftauen sind die Proben sofort einsetzbar.


Die Serumsammlung wird in 5 einfrierbaren Papierkartons geliefert. Alle Proben sind laufend nummeriert, mit Barcode versehen und anonymisiert. Zur besseren Wiederfindung sind die Seren nach Indikationen sortiert und mit einem Farbcode versehen. Eine Übersicht ist auf jedem Karton aufgedruckt, s. folgende Tabelle:

Inhalt:

Indikation	Serien-Nr.	Anzahl	Box
Rheumatoide Arthritis	001 – 100		1
	101 – 200		2
	201 – 274	274	3
SLE	275 – 300		3
	301 – 317	43	4
PSS	318 – 379	62	4
	380 – 400		4
Sjögren-Syndrom	401 – 405	26	5
	406 – 448	43	5
Vaskulitis	449 – 465	17	5
	466 – 470	5	5
Autoimmune Lebererkrankungen	471 – 493	23	5
Sonstige Erkrankungen	494 – 500	7	5
p-ANCA pos. Kollagenosen			

Die folgende Grafik gibt einen Überblick über die Verteilung der jeweiligen Indikationen im Kollagenosenkollektiv. Die Indikationen sind über den Farbcode zuordenbar.

Anzahl der Seren pro Indikation

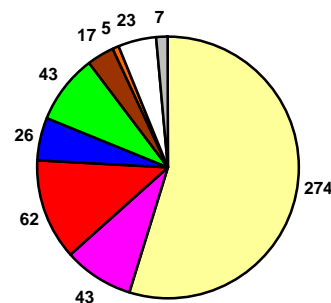

Vorsichtsmaßnahmen

Alle Materialien humanen Ursprungs sind als potentiell infektiös zu betrachten und daher sind die allgemein anerkannten Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten.

Verwendete Symbole

Chargenbezeichnung



Verfallsdatum



Lagertemperatur



Kundenservice/Bestellungen

Telefon: 03302 883 891

Fax: 03302 883 890

service@inventdiagnostica.de

