



Produktnummer: 01007

Gebrauchshinweise zu den Serumkollektiven für Autoimmunerkrankungen

Anwendung

Die diversen Serumsammlungen eignen sich zur Validierung von Testsystemen für Untersuchungsparameter oder zu deren klinischer Bewertung oder zum Vergleich von Testsystemen untereinander.

Packungsgröße

Jedes Kollektiv enthält zwischen 25 und 100 verschiedene Proben von Patienten mit Autoimmunerkrankungen mit je 1 ml gefrorenem Humanserum.

Der Bezug von identischen Kollektiven ist mehrfach möglich.

Spezifikationen

Die Serumsammlungen enthalten Patientenproben mit tiefgehender klinischer Dokumentation.

Die Einzelseren enthalten keine Zusätze oder Stabilisatoren, die die Messungen beeinflussen könnten.

Dokumentation

Zur Serumsammlung wird eine Dokumentation in digitaler Form mitgeliefert. Diese enthält Informationen zu Indikation, Alter und Geschlecht der Patienten sowie ggf. Messdaten der Untersuchungsparameter.

Angaben zu Testsystem und Referenzbereichen sind in der Datei zu finden. Auf Anfrage sind Informationen zu Begleiterkrankungen und Therapie erhältlich.

Lagerung und Haltbarkeit

Originalverschlossen und bei -18°C gelagert sind die Kollektive bis zu 48 Monaten, maximal jedoch bis zum angegebenen Verfallsdatum, haltbar.

Gebrauchshinweise

Nach dem Auftauen sind die Proben sofort einsetzbar.

Die Serumsammlung wird in einfrierbaren Papierkartons geliefert. Alle Proben sind laufend nummeriert, mit Barcode versehen und anonymisiert.

Inhalt:

Im folgenden sind die lieferbaren Kollektive aufgeführt:

Nr	Kollektivbezeichnung	Indikationen	Anzahl
1	Rheumatoide Arthritis	RA	100
2	Chronisch entzündliche Darmerkrankungen	Colitis Ulcerosa Morbus Crohn	50 50
3	Kollagenosen	Mischkollagenose SLE Sjögren Syndrom	20 60 20
4	Diabetes Typ 1	Diabetes Typ 1	65
5	Zöliakie	Zöliakie	25
6	Autoimmune Schilddrüsenerkrankungen	Morbus Basedow Hashimoto atrophische lymphozytäre Thyreoiditis	45 25 30

In Vorbereitung befinden sich Kollektive für Alzheimer Demenz, Multiple Sklerose und autoimmune Lebererkrankungen.

Vorsichtsmaßnahmen

Die für die Zusammenstellung der Kollektive verwendeten Humansenen wurden auf HIV I/II-AK, HCV-AK und HBsAg negativ getestet.

Alle Materialien humanen Ursprungs sind als potentiell infektiös zu betrachten und daher sind die allgemein anerkannten Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten.

Verwendete Symbole

Chargenbezeichnung	
Verfallsdatum	
Lagertemperatur	

Kundenservice/Bestellungen

Telefon: 03302 883 891
Fax: 03302 883 890
service@inventdiagnostica.de

